

Les attaches “Comfort Flex”

Attends Healthcare Products est fière de présenter une nouvelle gamme de culottes Attends Aérées avec un revers doux et des panneaux ventilés qui permettent une circulation d'air résultant en une peau plus saine et un confort et dignité accrus. Ces culottes sont munies de nouvelles attaches “Comfort Flex” qui offrent une meilleure adhérence.

DESCRIPTION

Les nouvelles attaches “Comfort Flex” sont douces, flexibles et peuvent être positionnées et repositionnées n'importe où sur la culotte.



COMMENT LES UTILISER

Il est important de s'assurer que les attaches “Comfort Flex” soient bien agrippées pour obtenir un bon ajustement:

Pour fixer les attaches “Comfort Flex”, il suffit de les positionner sur la culotte et d'**APPUYER** fermement sur les attaches.

PUIS...

TIREZ légèrement sur chaque attache afin de s'assurer qu'elles soient adhérentes fermement à la culotte.

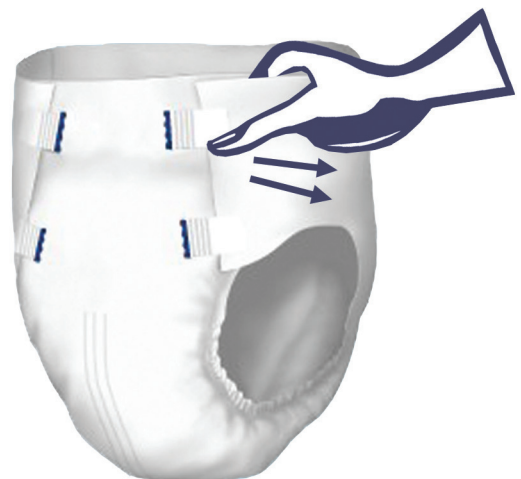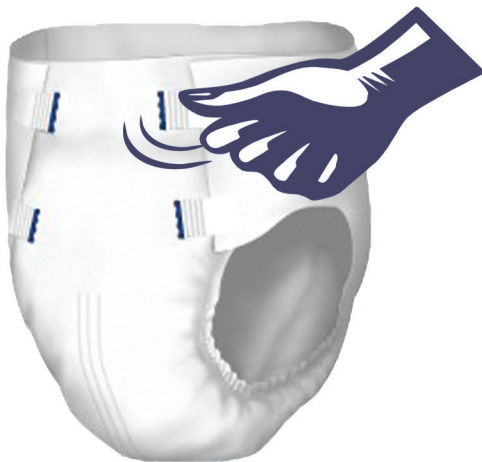

Comme pour les attaches régulières, il est important de positionner les attaches du bas en premier en faisant un angle vers le haut et ensuite les attaches du haut vers le bas.

Cette technique assure un ajustement confortable et sécuritaire.