

Guide pour la résolution de problèmes

PROBLÈME:	CAUSE(S) PROBABLE(S):	SOLUTION(S):
Ampoules	Feuille arrière retournée	Assurez-vous que la feuille arrière ne touche pas à la peau
	Autocollant qui touche à la peau	Assurez-vous que l'autocollant est bien fixé à la culotte
	Culotte trop ajustée	Vérifiez l'ajustement pendant la mise en place
Plis des aines rouges ou lignes sur les cuisses	Rebords de la culotte mal ajustés dans le pli de la cuisse	Ajustez les rebords de la culotte sur les aines et assurez-vous qu'ils sont tournés vers l'extérieur pour que la feuille arrière ne touche pas à la peau
Rougeurs dans la région du périnée ou des fesses	Soins périnéaux inadéquats	Assurez-vous que des soins périnéaux sont réalisés lors de chaque changement
	Changements peu fréquents	Changez les culottes selon un horaire précis, lorsque l'indicateur est activé aux 3/4 ou selon un protocole par installation
Intérieur des cuisses rouge	Ajustement trop serré aux cuisses	La peau devrait toujours être propre et sèche
	Soins périnéaux inadéquats	La peau devrait toujours être propre et sèche
	Culotte trop grande; ample entre les cuisses	Trouvez la grandeur appropriée; les rebords devraient être bien ajustés aux aines
Lit/vêtements mouillés	Résidant qui ne porte pas sa culotte	Évaluez le besoin du résident de porter une culotte
	Culotte saturée	Informez l'infirmière responsable; changements plus fréquents, surveiller aux 2 heures; changement lorsque mouillé, plus particulièrement pour ceux qui perdent une grande quantité d'urine
	Ajustement trop ample	Rappelez au personnel qu'un bon ajustement est nécessaire pour assurer la rétention
	Mauvaise grandeur	Assurez-vous que la culotte est de la bonne grandeur; une taille trop grande peut causer des fuites
Résidant qui tripote ou enlève sa culotte	Pénis mal placé	Placez le pénis vers le bas
	Culotte mal mise en place (ce qui la rend inconfortable)	Assurez-vous que la culotte est bien mise en place
	Culotte pas suffisamment discrète	Couvrez la culotte avec des sous-vêtements ou un pyjama
Démangeaisons sur les hanches et les fesses	Résidant confus	Soyez persévérant; généralement, les résidents s'habituent à porter une culotte et arrêtent de s'en soucier
	Accumulation d'urine et de sels de transpiration	Assurez-vous que les hanches et les fesses sont bien lavées lors des soins périnéaux

REMARQUE : Une mise en place inadéquate ou un mauvais ajustement peuvent causer des problèmes cutanés. Il existe toutefois d'autres conditions, d'ordre médical, qui peuvent provoquer ces irritations, et il est important de consulter un médecin lorsqu'une irritation cutanée se manifeste.