

Guía para la Solución de Problemas

PROBLEMA:	CAUSA(S) PROBABLE(S):	SOLUCIÓN(ES):
Ampollas	Capa externa remetida bajo el borde	Compruebe que la capa externa quede separada de la piel
	La cinta roza la piel	Compruebe que la cinta esté bien colocada en el pañal
	Pañal demasiado apretado	Durante la aplicación, revise que no haya partes demasiado ceñidas
Enrojecimiento en las ingles o marcas lineales en los muslos	Plisado antiderrame mal acomodado en los pliegues de las piernas	Acomode bien el plisado en las ingles; compruebe que esté vuelto hacia fuera y que la capa externa quede separada de la piel
Enrojecimiento del perineo o los glúteos	Falta de un buen aseo perineal	Asegúrese de hacer un aseo perineal apropiado en cada cambio
	Cambios sin la debida frecuencia	Cambie el pañal oportunamente, cuando el indicador esté a 3/4 del nivel máximo, o según las indicaciones clínicas
Enrojecimiento de la cara interna de los muslos	Muslos gruesos muy juntos	La piel se debe mantener limpia y seca
	Falta de un buen aseo perineal	La piel se debe mantener limpia y seca
	Pañal demasiado grande; muy holgado entre los muslos	Vea que el tamaño sea el correcto; el plisado debe quedar bien colocado en las ingles
Mojadura de la cama o la ropa	Residente que no usa pañal	Evalúe la necesidad de que el residente use pañal
	Pañal saturado	Avise a la enfermera responsable; Cambios más frecuentes; revise cada 2 horas; cámbielos cuando se mojen, sobre todo en incontinencia abundante
	Pañal muy holgado	Recuerde al personal que para una contención adecuada se necesita mayor ajuste
	Tamaño incorrecto	Compruebe que el pañal sea del tamaño correcto; si es muy grande puede tener escapes
	Posición incorrecta del pene	El pene debe apuntar hacia abajo
El residente toquetea el pañal o se lo quita	Aplicación incorrecta (si el pañal está mal puesto, será incómodo)	Verifique que el pañal esté bien puesto
	El pañal no es lo suficientemente discreto	Cubra el pañal con calzón o pijama
	Confusión mental en el residente	Sea persistente; por lo general el residente se acostumbrará a usarlo y dejará de tocarlo
Rasguños en la región de caderas y glúteos	Acumulación de sales de orina y sudor	Verifique la limpieza adecuada de glúteos y caderas durante el aseo perineal

PRECAUCIÓN: Aunque la colocación o ajuste incorrectos pueden causar problemas de la piel, la irritación puede deberse también a algún trastorno médico. Por esa razón, se debe consultar al médico siempre que se observe irritación de la piel.